

مراحل شستشوی ابزار پزشکی و دندانپزشکی قابل اتوکلاو کردن و معرفی تستهای اتوکلاو و فور

1- ابزار بلافاصله پس از استفاده و قبل از خشک شدن در محلول پاک کننده آنزیماتیک با رقت و زمان کافی طبق دستورالعمل شرکت تولید کننده قرار داده شود.

2- پس از گذشت زمان کافی با برس ریز مخصوص ابزار به دقت برس کشی شده تا تمام جرم و آلودگی برطرف شده و سپس آبگشی گردد.

3- ابزار آب کشی شده در محلول ضدعفونی ابزار با رقت و زمان مناسب طبق دستور شرکت تولید کننده قرار داده شود.

4- آب کشی نهایی ابزار صورت گیرد و در جایی مناسب قرار داده شود تا به خوبی خشک شود. در صورت امکان استفاده از آب و هوای پرفشار توصیه می شود که در این صورت ابزار در حد مطلوب آب کشی و خشک می شوند.

5- ابزار خشک و بسته بندی شده در اتوکلاو یا فور با زمان و دمای کافی طبق توصیه شرکت سازنده قرار گیرد .

\* بسته ها را طوری در اتوکلاو قرار دهید که حداکثر چرخش بخار در بین آنها ایجاد شود و با دیواره های اتوکلاو نیز تماسی نداشته باشد.

**نکات مهم:**

- کاغذ بسته بندی ابزار باید سلولزی باشد. مدت زمان اعتبار استریل ابزار با این کاغذها حداقل 3 ماه است.

- تستهای مخصوص اتوکلاو (حرارت مرطوب): کلاس 6 مخصوص اتوکلاو - بیولوژیک (حاوی باسیلوس استئاروترموفیلوس)

- اتوکلاو های پری و کیوم (پیش خلاً) باید از تست بووی دیک (نفوذ بخار) هم استفاده کنند .

- تست های مخصوص فور یا حرارت خشک (OVEN): کلاس 6 مخصوص فور و بیولوژیک (حاوی باسیلوس سوبتیلیس)

- آنکوباتور مخصوص به منظور قرار دادن ویالهای تست بیولوژیک در آن.

- مستندات تستهای استفاده شده حداقل به مدت یک سال نگهداری شود. در مورد تستهای بیولوژیک فقط برچسب روی تست نگهداری شود و خود ویال پس از اینکه بار دیگر در اتوکلاو یا فور استریل شد در زباله عفونی دفع شود.

\* وسایل لازم جهت پاکسازی ابزار: ظرف مخصوص غوطه وری مناسب با اندازه ابزار - برس شستشو - بشر مدرج و پیپت مدرج جهت تهیه محلول رقیق شده طبق دستور شرکت سازنده

\* محلولهای ضدعفونی لازم: دست - آنزیماتیک - ابزار - آماده مصرف - سطوح

